

**Pour en finir avec
les désagréments
du fil de rétraction...**



Racecord Caps

Pâte de rétraction
gingivale temporaire



Pour une rétraction et un séchage marginaux provisoires de la gencive et du sillon gingival sur un parodonte sain

Contient du Kaolin et du Chlorure d'Aluminium pour une action astringente locale

Indications

- Prise d'empreintes prothétiques (physique ou optiques).
- Préparations périphériques prothétiques.
- Isolation des cavités juxta-gingivales en dentisterie restauratrice.

Avantages

- ✓ Facilité d'application directement dans le sulcus grâce à la canule flexible (une canule est suffisante pour 2 à 3 dents).
- ✓ Reste en place dans le sulcus grâce à une consistance adaptée.
- ✓ Facilement visible et repérable dans le sulcus grâce à sa couleur contrastante.
- ✓ Protocole plus rapide que la méthode traditionnelle avec les fils de rétraction.



Dégager votre champ opératoire en contrôlant les fluides,
désormais c'est facile et sans fil...



1. Préparer la dent.



2. Appliquer la pâte lentement autour de la préparation dans le sillon gingival. Laisser agir la pâte pendant 2 minutes maximum pour permettre la rétraction gingivale. Garder la zone traitée au sec pendant que le produit agit.



3. Éliminer totalement la pâte du sillon gingival et de la cavité buccale avec un spray eau/air et à l'aide de la canule d'aspiration.



4. Prendre l'empreinte.

Photos Dr. Patrick Sultan

PRÉSENTATION

- 20 compules de 0,37g extractibles



Dispositif médical de Classe I réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Marqué CE. Fabricant : Indigodental GmbH - Deutschland. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France
Tél. : 01 49 76 70 02

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.septodont.fr

