

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

Dispositif d'injection
sécurisé stérile à usage unique





FICHE TECHNIQUE ULTRA SAFETY PLUS TWIST



Ultra Safety Plus TWIST est un système d'injection sécurisé et intuitif qui s'utilise avec les nouvelles aiguilles protégées TWIST et les nouvelles poignées TWIST (poignées bleues stérilisables ou poignées blanches stériles à usage unique).

S'il vous reste des questions quant à l'utilisation d'Ultra Safety Plus TWIST, n'hésitez pas à contacter votre représentant Septodont ou à consulter nos différents éléments d'information sur www.septodont.fr

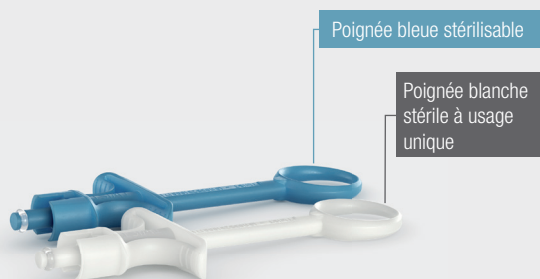

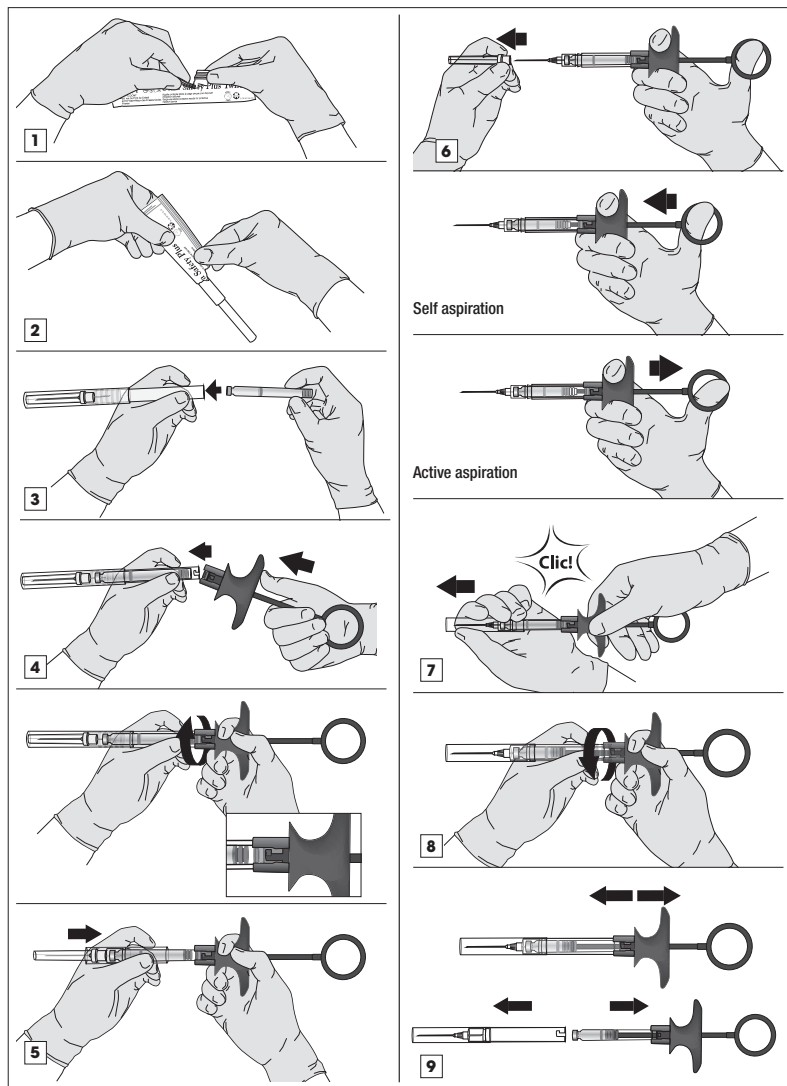


ATTENTION !

Les nouvelles aiguilles TWIST sont incompatibles avec les poignées noires de l'ancienne génération d'Ultra Safety Plus.



Lorsque plusieurs injections doivent être réalisées, remplacer le dispositif à chaque changement de cartouche **1 injection = 1 cartouche + 1 dispositif**

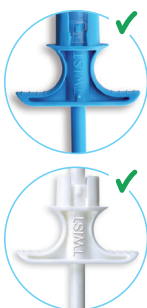

SCANNEZ LE QR CODE



ET VISIONNEZ LA VIDÉO D'UTILISATION D'ULTRA SAFETY PLUS TWIST



- 1 Déchirez le sachet du dispositif d'injection au milieu.
- 2 Laissez tomber le dispositif d'injection sur le plateau stérile, en tenant le sachet des deux mains (évitiez de manipuler le dispositif de manière à maintenir la stérilité des produits)
- 3 Saisissez fermement le corps de la seringue et insérez entièrement la cartouche dans l'extrémité ouverte du dispositif.
- 4 Coulissez la tige du piston de la poignée complètement vers l'arrière et placez le pouce derrière le porte-doigt. Introduisez la poignée dans le corps du dispositif d'injection, derrière la cartouche. Les 2 ergots du porte-doigts doivent être alignés sur les encoches du corps du dispositif. Après assemblage, faites pivoter le porte-doigt par rapport au corps du dispositif afin de loger les ergots dans les encoches en forme de L pour les verrouiller.
- 5 Faites glisser le fourreau protecteur vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la poignée. Assurez-vous que le fourreau protecteur est en Position Arrière, c'est-à-dire après la résistance, pour éviter le désassemblage de la poignée.
- 6 Retirez le capuchon de l'aiguille et jetez-le. Il est conseillé d'amorcer le dispositif d'injection pour enlever tout air résiduel, puis effectuer l'aspiration.
Aspiration passive : il y a à l'intérieur du système d'injection une petite protubérance à l'endroit où le diaphragme de la cartouche est placé. Lorsque la cartouche est insérée, l'extrémité arrière de l'aiguille pénètre le diaphragme de la cartouche. Pendant l'injection, le diaphragme de la cartouche appuie sur la protubérance. Lorsque l'injection est interrompue, la pression est relâchée et l'aspiration se produit.
Aspiration active : elle peut être obtenue grâce au joint situé à l'extrémité de la tige de la poignée (piston) qui crée un vide lorsque la poignée est tirée.
Le dispositif est maintenant prêt pour l'injection.
Si vous souhaitez reposer le dispositif, l'aiguille peut être recouverte en faisant doucement glisser le fourreau protecteur sur le cylindre jusqu'à ce qu'un blocage soit ressenti.
- 7 Après l'injection, maintenez le fourreau protecteur et faites-le glisser le long du corps du dispositif d'injection jusqu'à la position initiale. Poursuivez le mouvement jusqu'au verrouillage final indiqué par un « CLIC ». Une fois en position de verrouillage final, n'essayez pas de faire coulisser le fourreau protecteur. Sinon, le système de protection n'est pas garanti. Le dispositif d'injection peut maintenant être détaché en toute sécurité de la poignée.
- 8 Pour retirer la poignée Twist, maintenez le corps du dispositif d'injection d'une main et, de l'autre, faites pivoter le porte-doigts dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déloger les ergots des encoches.
- 9 Tirez ensuite la tige du piston de la poignée et détachez la poignée. La cartouche reste attachée au piston de la poignée par effet ventouse. La cartouche est automatiquement enlevée du fourreau lorsque le piston se retire.

Le dispositif d'injection peut être jeté en toute sécurité dans un container prévu à cet effet.

*Voir les indications d'Ultra Safety Plus Twist sur notre site internet : www.septodont.fr

Ultra Safety Plus Twist : Ce système est un assemblage de dispositifs médicaux - Dispositif d'injection (Classe IIa - CE 0459) - Poignées réutilisables (Classe I). Reportez-vous aux notices d'utilisations des dispositifs médicaux pour plus d'information. Poignée stérile (Classe Is - CE 0459). Réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX - France

Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.septodont.fr

