

Votre **spray** **réfrigérant** Septodont



CryoPulp

Spray réfrigérant
parfum menthe




CryoPulp - votre spray réfrigérant Septodont

CryoPulp convient pour le refroidissement rapide des boulettes de coton, pour les tests de vitalité pulpaire et pour le refroidissement de matériaux d'empreintes, comme l'hydrocolloïde, etc.

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Buse d'application	Pulvérisation précise	Utilisation facile et sécurisée
Gaz butane-propane	Effet de refroidissement optimal	Efficacité
Parfum menthe	Agréable	Acceptation des patients

Mode d'emploi

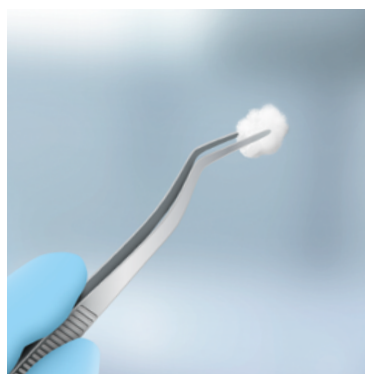

Saisir une boulette de coton



Pulvériser 1-2 secondes à 2-3 cm de distance de la zone à refroidir



La boulette doit être appliquée sur la face vestibulaire de la dent séchée au préalable. Les dents adjacentes doivent également être testées.

Information produit

- 200 ml
- Température de sortie $\leq -40^{\circ}\text{C}$



Dispositif médical de Classe I réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Marqué CE. Fabricant : PRISMAN GmbH. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.septodont.fr

