

# Nouveauté Septodont fil de rétraction



Fil tricoté  
100 % coton  
pour une meilleure  
résistance et une  
mise en place aisée

## *Septofil N*

Fil de rétraction tricoté,  
non imprégné




# Septofil N : fil de rétraction gingivale tricoté non imprégné

Conçu pour la rétraction gingivale temporaire.

Caractéristiques	Propriétés	Avantages
100 % coton	Matière naturelle	Contrôle efficace de l'humidité et minimisation de l'irritation gingivale
Fil de rétraction tricoté	Structure spécifique	Meilleur pouvoir d'absorption et d'expansion
Aucun agent de blanchiment fluorescent	Coton traité naturellement	Réduction du risque d'effets secondaires

## Recommandations d'utilisation

Taille	Technique du simple cordonnet	Technique du double cordonnet
0 <sup>4</sup>	Incisives mandibulaires avec gencive attachée insuffisante et/ou fine	Pour les incisives mandibulaires comme cordonnet interne, en particulier avec une gencive attachée insuffisante et fine
0 <sup>3</sup>	dent antérieure avec gencive attachée fine	Comme cordonnet interne pour les gencives attachées fines
0 <sup>2</sup>	dent antérieure	Comme cordonnet interne pour les gencives épaisses Comme cordonnet externe pour les gencives fines
0	prémolaire	Comme cordonnet externe pour les gencives fines
1	molaire	Comme cordonnet externe pour les gencives épaisses
2	Molaire, en particulier pour les zones distales des dents terminales	Comme cordonnet externe pour les gencives très épaisses

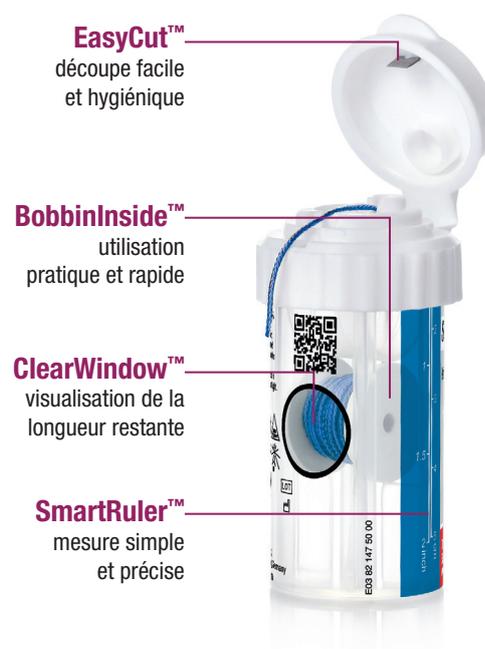

## Informations produit

Flacon avec bouchon passe-fil de 2,54 m

- N°0<sup>4</sup> : super fin / noir et bleu / 305 cm / 0,5 mm
- N°0<sup>3</sup> : ultra fin / noir et gris / 305 cm / 0,7 mm
- N°0<sup>2</sup> : extra fin / marron et jaune / 305 cm / 0,82 mm
- N°0 : fin / violet / 305 cm / 0,99 mm
- N°1 : medium / bleu / 305 cm / 1,2 mm
- N°2 : gros / vert / 305 cm / 1,35 mm



Dispositif médical de Classe I réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Marqué CE. Fabricant : EASTDENT - Corée. Mandataire : Biogeri - Allemagne. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX - France  
Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, consultez notre site web : [www.septodont.fr](http://www.septodont.fr)

