


DENTAPEN®

Seringue électronique pour l'anesthésie dentaire

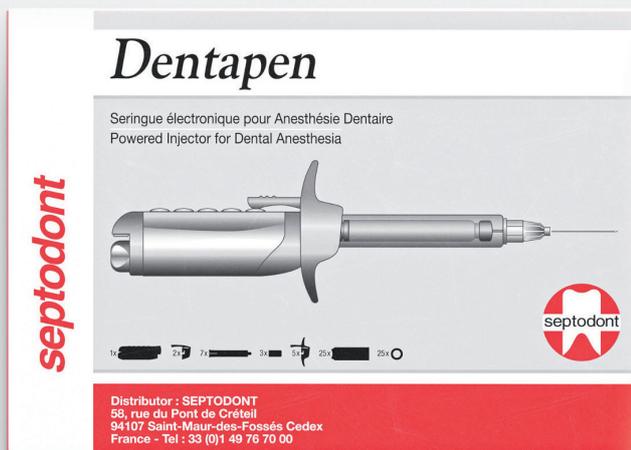


FICHE TECHNIQUE DENTAPEN®



La facilité d'utilisation du Dentapen et ses fonctionnalités vous ont convaincu mais vous vous demandez : comment entretenir votre seringue électronique et l'utiliser de la manière la plus optimale qui soit ?

Cette fiche technique illustrée et la vidéo associée vous donneront conseils et astuces pour utiliser au mieux votre Dentapen au quotidien et pour longtemps.



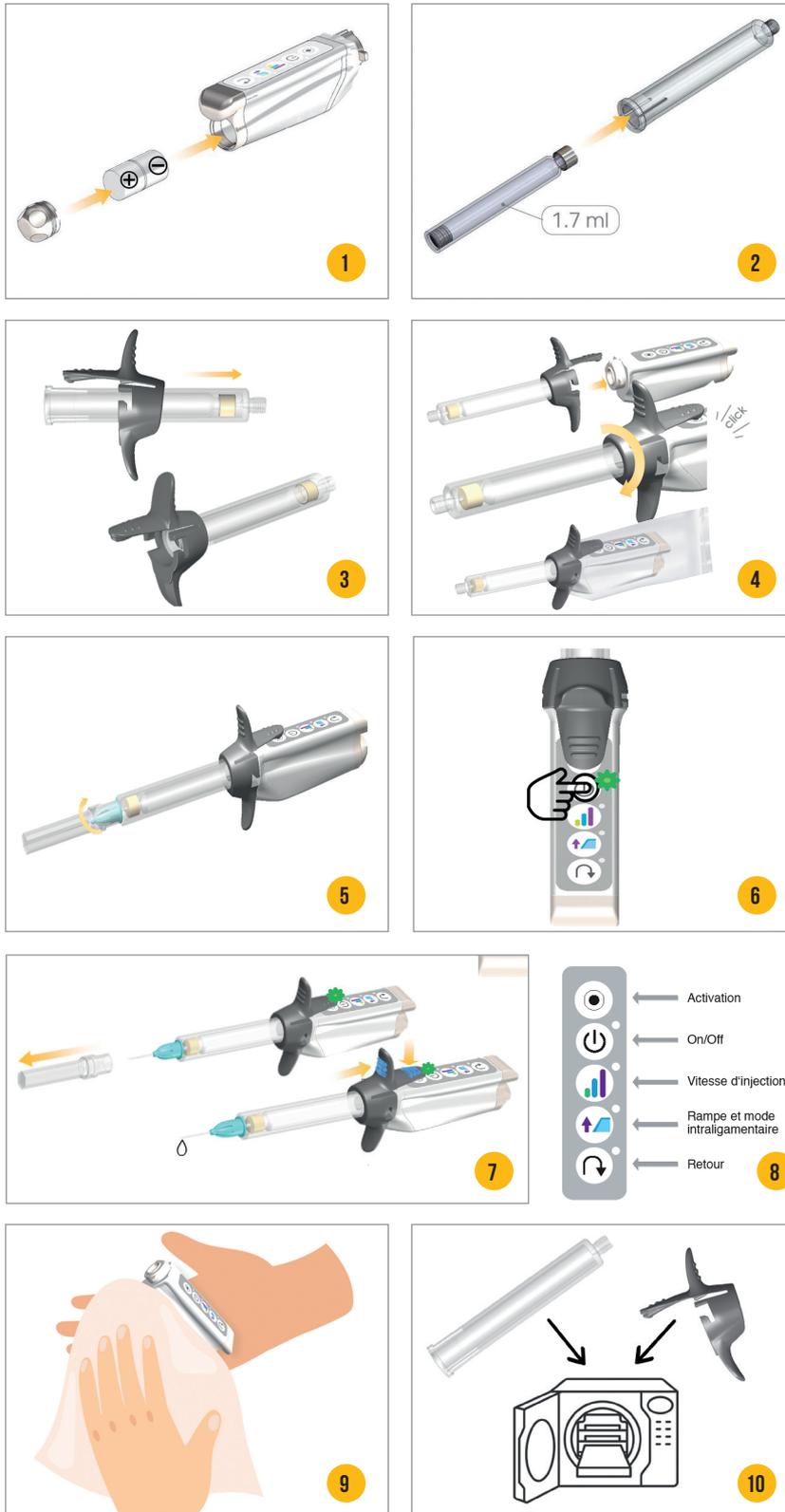

- 1 Insérer la pile. En moyenne, une pile permet de réaliser entre 50 et 100 injections en fonction du mode et de la vitesse choisis.
- 2 Insérer la cartouche dans le porte-cartouche.
- 3 Engager le porte-cartouche dans le repose-doigts.
- 4 Glisser le Dentapen® dans la gaine protectrice à usage unique, connecter le repose-doigts à l'injecteur et pivoter jusqu'au "clic".
- 5 Visser l'aiguille au porte-cartouche sans retirer le capuchon.
- 6 Appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED verte indique que le dispositif est allumé et prêt à l'emploi.
- 7 Retirer le capuchon de l'aiguille et faire pivoter le porte-cartouche pour l'orienter comme souhaité. De la solution anesthésiante peut couler si le capuchon de l'aiguille est enlevé lorsque l'appareil est éteint.
- 8 Sélectionner la vitesse d'injection souhaitée, la rampe optionnelle ou le mode intraligamentaire.
- 9 Après chaque utilisation, appuyer sur le bouton marche arrière pour ramener la vis à sa position initiale (sans liquide). Le Dentapen® est un système d'injection non-stérile. Nous conseillons de l'essuyer avec un linge humide pour enlever tout résidu organique visible (sang, salive, etc.) et sels inorganiques.
- 10 Le repose-doigts et le porte-cartouche doivent être désassemblés l'un de l'autre et autoclavés maximum à 135°C pendant 3 minutes. En moyenne, les porte-cartouches peuvent être autoclavés une centaine de fois et les repose-doigts environ 500 fois.

SCANNEZ LE QR CODE



ET VISIONNEZ LA VIDÉO
DU DENTAPEN



*Voir les indications de Dentapen sur notre site internet : www.septodont.fr

Dentapen : Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE2460 DNV GL NEMKO Presafe AS. Fabricant : JuvaPlus - Suisse. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX - France
Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.septodont.fr

