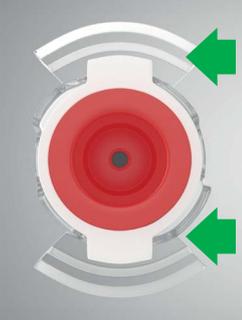
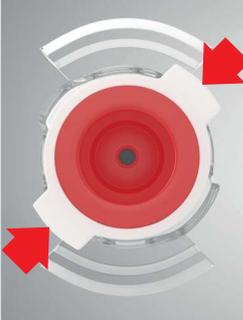


Biodentine™ XP

Substitut dentinaire bioactif ^{(1)*}

Comment l'utiliser ? A faire et ne pas faire !

Étapes	A FAIRE 	A NE PAS FAIRE 
<p>AVANT DE COMMENCER</p> 	<p>S'assurer que les ailettes blanches de chaque côté de la cartouche soient bien alignées avec les ailettes transparentes</p> 	<p>Ne pas manipuler les cartouches dans vos mains pour éviter que les ailettes se désalignent.</p> 
<p>1 ACTIVER</p>	<p>Utiliser les deux mains: une main sur le mixeur, une autre main sur le levier.</p>  <p>Pour activer la cartouche, descendre le levier vers le bas jusqu'à entendre un click.</p>	
<p>2 MÉLANGER</p>	<p>Vérifier si la cartouche est bien verrouillée sur le support avant de mélanger.</p> 	
<p>3 AMORCER</p>	<p>Immédiatement après le mélange, amorcer la cartouche à l'aide du pistolet : lever le levier du pistolet en position horizontale, insérer la cartouche et la tourner à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour s'assurer qu'elle soit correctement verrouillée.</p> 	<p>Ne pas attendre plus d'1min.30 entre le mélange et l'amorçage.</p> <p>Ne pas exercer une force excessive sur le levier ; vérifier qu'il soit en position horizontale.</p>

Veuillez consulter les indications et la notice d'utilisation de Biodentine™ XP sur notre site internet www.septodont.fr

• **Biodentine™ XP** : Substitut dentinaire bioactif réservé à l'usage professionnel dentaire non remboursable au titre de la LPP - Prise en charge possible par les organismes d'assurance maladie pour un coiffage pulpaire (acte codifié HBF0010 : parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct) ainsi qu'une pulpotomie camérale sur dent temporaire (acte codifié HBF0006 : exérèse de la pulpe camérale [biopulpotomie] d'une dent temporaire) dans le cadre de la classification commune des actes médicaux. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Dispositif médical de Classe III, marqué CE par l'Organisme Notifié GMED (CE0459). Fabricant : Septodont - France. • **Biodentine™ Gun** : Dispositif pour extrusion de substitut dentinaire réservé à l'usage professionnel dentaire. Accessoire de Biodentine™ XP exclusivement. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Dispositif de Classe I, marqué CE. Fabricant : Septodont - France. • **Biodentine™ Mixer** : Dispositif pour activer et mélanger les cartouches, réservé à l'usage professionnel dentaire. Accessoire de Biodentine™ XP exclusivement. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Dispositif de Classe I marqué CE. Fabricant : Motion Dental Equipment Corporation - Taïwan.

Septodont

58 rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France / Tél. : 01 49 76 70 02

www.septodont.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : **Septodont France**



*Données expérimentales non substituables chez l'humain en clinique.
(1) Semennikova K., Colon P. et Pradelle-Plasse N. Les ciments tricalciques – Exemple du matériau Biodentine™ – Partie 1 : Présentation, composition et propriétés. 2:16-25 Biomatériaux Cliniques 2016

Communication France - 12195S - Mars 2024