


Biodentine™*

Substitut dentinaire bioactif

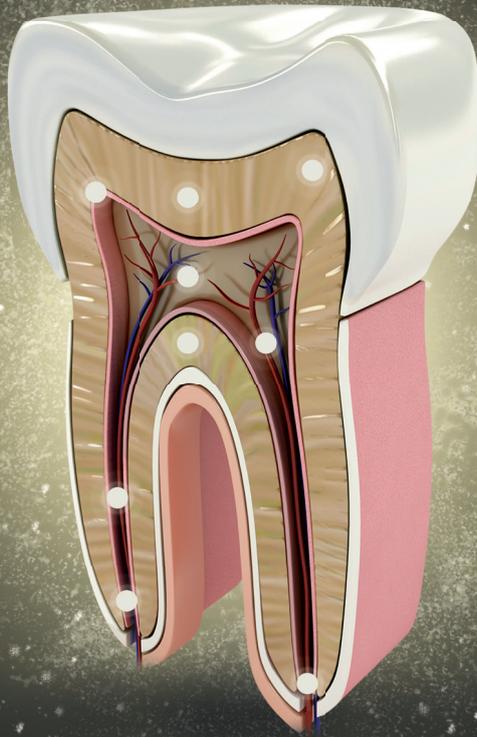

**AIDE-MÉMOIRE À LA PRÉPARATION
DE BIODENTINE™**



ACTIVE
BIOSILICATE
TECHNOLOGY®**




Biodentine™*


AIDE-MÉMOIRE À LA PRÉPARATION DE BIODENTINE™




1 Sortir la capsule de poudre de son emballage.

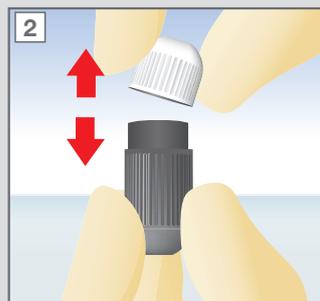


2 Ouvrir la capsule de poudre.

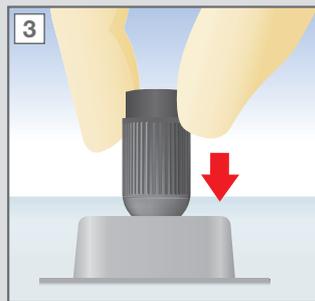


3 Vérifier que la poudre n'est pas trop compacte avant de poser la capsule sur son socle.

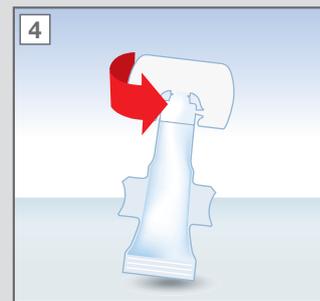


4 Ouvrir la monodose. Elle contient 0.20 mL de liquide.

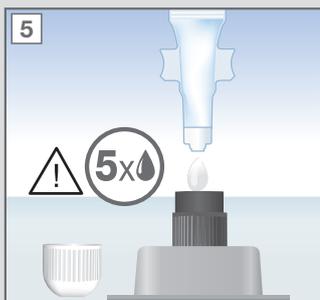


5 Faire tomber 5 gouttes de liquide dans la capsule de poudre en exerçant une pression constante et à hauteur des yeux.

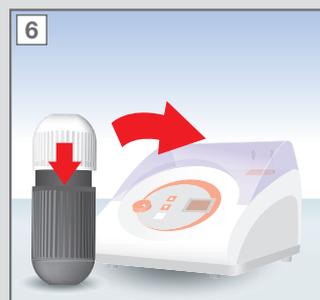


6 Refermer et placer la capsule dans le vibreur.

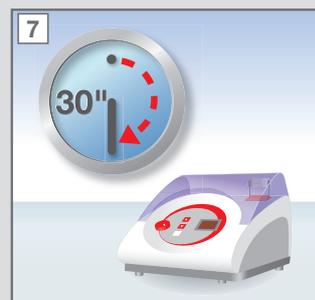


7 Vibrer 30 secondes.

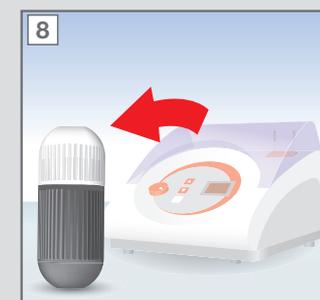

8 Retirer puis ouvrir la capsule. Si trop épais, ajouter 1 goutte et vibrer 10 secondes. Si trop fluide, attendre 30 secondes.

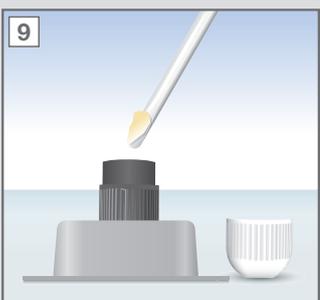

9 Récupérer le matériau à l'aide d'une spatule.

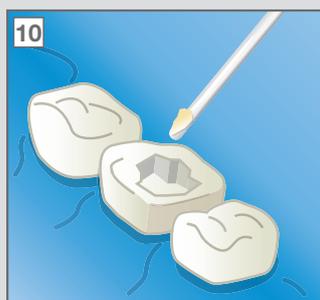

10 Placer Biodentine™ dans la cavité sans fouler.

SCANNEZ LE QR CODE



ET VISIONNEZ LA VIDÉO
DE LA PRÉPARATION DE
BIODENTINE™



*Voir les indications de Biodentine™ sur notre site internet : www.septodont.fr/biodentine

**Technologies des silicates bioactifs

Biodentine™ : Dispositif médical de Classe III réservé à l'usage professionnel dentaire. Non remboursable au titre de la LPP - *Prise en charge possible par les organismes d'assurance maladie uniquement pour un coffrage pulpaire dans le cadre de la classification commune des actes médicaux (acte codifié HBF010 : parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coffrage direct)*. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Poudre + Liquide : Septodont France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Spatules : Dispositif médical de classe I marqué CE. Fabricant : Medistock France.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX - France
Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.septodont.fr

