


BioRoot™ RCS*

Ciment de scellement canalaire minéral bioactif

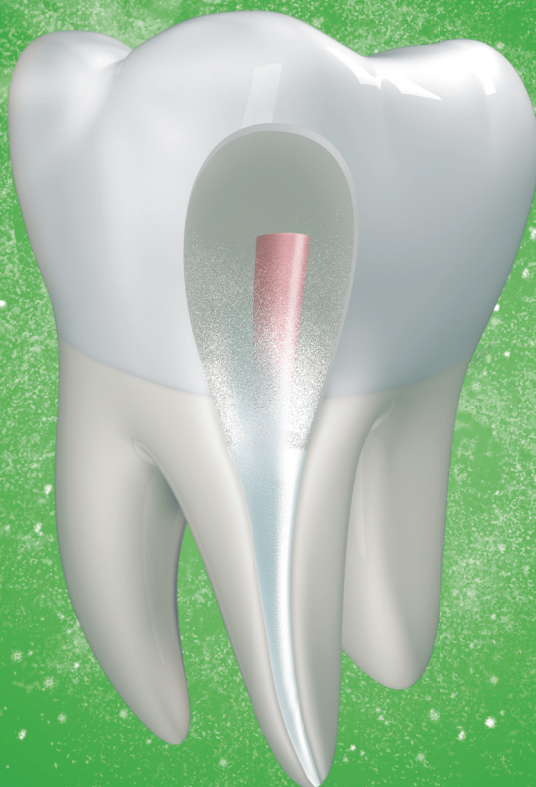

FICHE TECHNIQUE BioRoot™ RCS



ACTIVE
BIOSILICATE
TECHNOLOGY™**



BioRoot™ RCS*

FICHE TECHNIQUE




Sortir le flacon et la cuillère de son emballage.


Aérer la poudre en retournant le flacon de poudre à deux reprises, et ouvrir le flacon avant utilisation



Prélever une dose de poudre BioRoot™ RCS avec la cuillère prévue à cet effet.

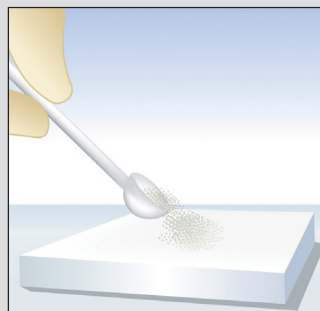


Mettre une cuillerée de poudre rase sur une plaque de mélange.

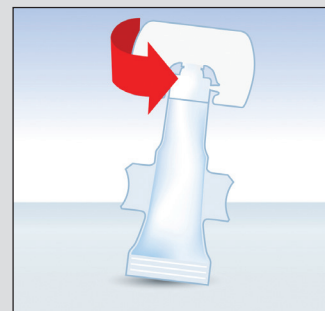


Ouvrir la monodose. Elle contient 0.25 mL de liquide.




Ajouter 5 gouttes de solution de mélange en exerçant une pression constante.

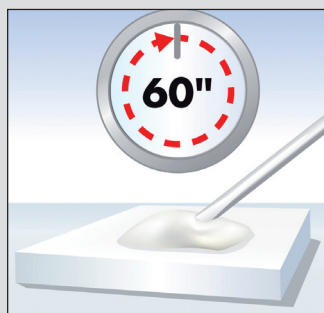


Mélanger 60 secondes jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

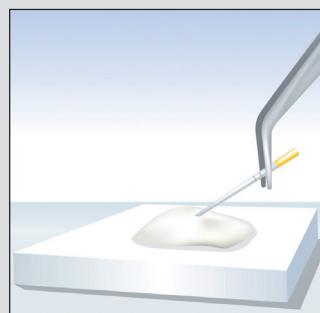


Prélever le mélange BioRoot™ RCS sur une pointe.

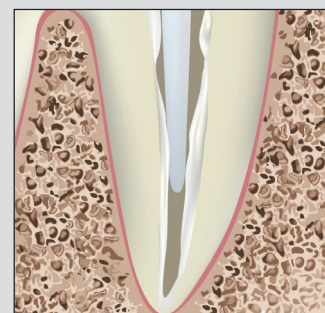

Enduire les parois du canal avec BioRoot™ RCS.

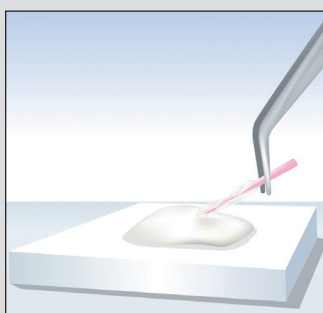

Enduire la pointe ajustée avec BioRoot™ RCS.

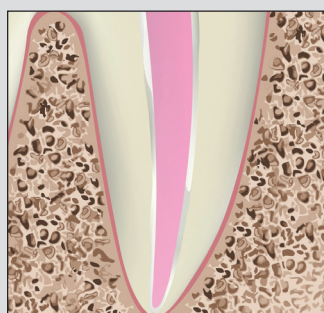

Insérer la pointe doucement dans le canal.



Radio post-opératoire.

SCANNEZ LE QR CODE



ET VISIONNEZ LA VIDÉO DE LA PRÉPARATION DE BioRoot™ RCS



*Voir les indications de BioRoot™ RCS sur notre site internet : www.septodont.fr

**Technologies des silicates bioactifs

BioRoot™ RCS : Dispositif médical de Classe III réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459. Fabricant : Septodont France. Cuillère doseuse : Dispositif médical de classe I marqué CE0459. Fabricant : STIPLASTICS France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.