

Revo-S+ SC1

25/06

Évaseement coronaire (si nécessaire)

Élargir le tiers coronaire pour éliminer les interférences et redresser la trajectoire.*




Glider

16/03

Sécurisation du canal radiculaire

Utiliser le Glider pour libérer les contraintes (ex. calcifications, grandes courbures) au niveau de l'apex.**

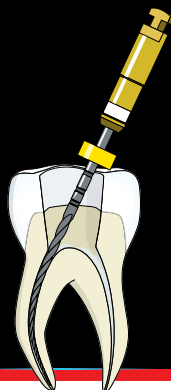

Revo-S+ SC2

25/04

Mise en forme du canal radiculaire

Mise en forme du canal jusqu'à l'apex.***




Revo-S+ SU


25/06

Mise en forme finale

Mise en forme finale pour une conicité uniforme et une préparation optimale.***

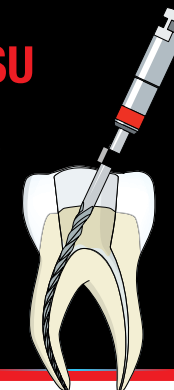

Lime K-File #10

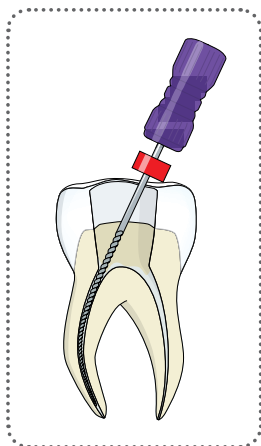


Exploration du canal

Explorer le canal pour identifier les contraintes et les courbures.

Canaux larges ou droits - 2 étapes - 2 instruments rotatifs


Revo-S+ SC2
25/04

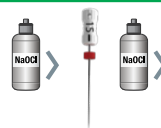

Revo-S+ SU
25/06

Canaux intermédiaires - 3 étapes - 3 instruments rotatifs

Revo-S+ SC1
25/06

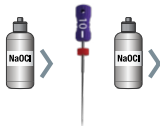

Revo-S+ SC2
25/04




Revo-S+ SU
25/06




Canaux fins ou présentant des contraintes

4 étapes - 4 instruments rotatifs


Revo-S+ SC1
25/06

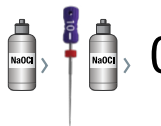

Glider
16/03

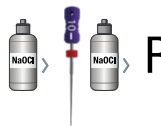

Revo-S+ SC2
25/04

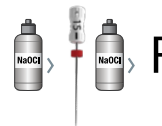

Revo-S+ SU
25/06

Irrigation finale et séchage

Utiliser 1 ou 2 pointes de papier (éviter de trop assécher le canal).

Obturation (technique monocône)

Introduire BioRoot™ Flow dans le canal, insérer la guttapercha à la longueur de travail, la couper et la tasser.

Réglages du moteur :

Rotation continue

Vitesse pour SC1, SC2, SU, Glider : 250-400rpm

Torque pour SC1, SC2, SU : 1,8-2,5N.cm

Torque pour Glider : 1,2N.cm

GenENDO protocole(s) pas à pas

BioRoot™ Flow : Ciment minéral bioactif d'obturation canalaire définitive en combinaison à des pointes de gutta-percha en cas de pulpe enflammée ou nécrosée dans le cadre du traitement initial ou de la procédure de retraitement. GenENDO fait partie du traitement endodontique pour la mise en forme du canal radiculaire. Ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément.



Retraitement - 4 étapes - 4 instruments rotatifs



Revo-S+ SC1
25/06

Remover
30/07





Revo-S+ SC2
25/04

Revo-S+ SU
25/06

BioRoot™ Flow

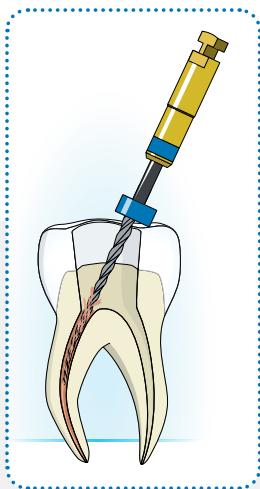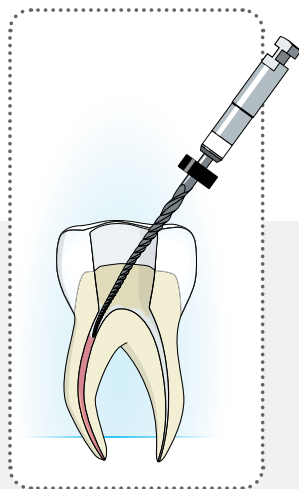

Lime K-File #10

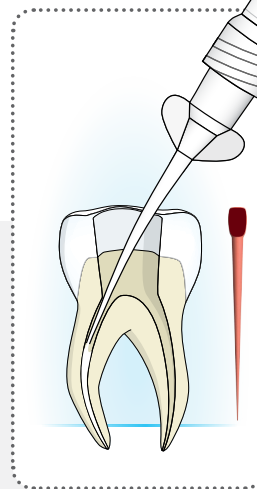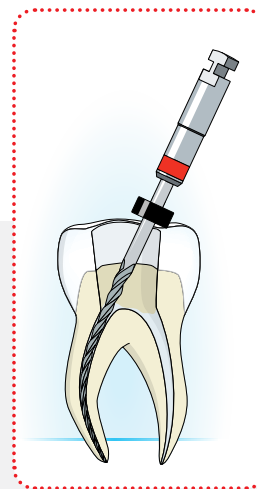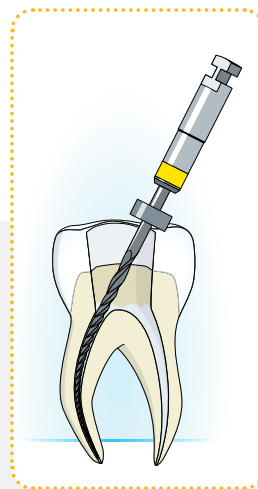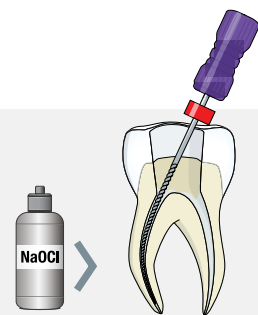

1- Désobturation du canal

Localiser l'entrée du canal et utiliser le Revo-S+ SC1 à une vitesse de 400 tr/mn., sur 1 à 2 mm, pour guider le Remover.

Utiliser le Remover pour éliminer le matériau d'obturation précédent (guttapercha, ciment) à une vitesse de 800 tr/mn.

Nettoyage et mise en forme

Si l'obturation arrive à l'apex, arrêtez-vous à 3 mm de la longueur de travail (LT).

Relocalisation de la position initiale avec la lime K

Atteindre la longueur totale de travail.

2- Mise en forme du canal radiculaire

Mise en forme du canal jusqu'à l'apex.

3- Mise en forme finale

Mise en forme finale pour une conicité uniforme et une préparation optimale.

Irrigation finale et séchage

Utiliser 1 ou 2 pointes de papier (éviter de trop assécher le canal).

4- Obturation (technique monocône)

Introduire BioRoot™ Flow dans le canal, insérer la guttapercha à la longueur de travail, la couper et la tasser.

Effectuer des mouvements de va-et-vient sans pression apicale.

Mouvement 1 : 3 mouvements vers le bas jusqu'à la LT.

Irrigation avec NaClO

Mouvement 2 : 1 mouvement centré vers le bas jusqu'à la LT et 1 mouvement vers le haut avec appui pariétal sélectif.

Communication France - 12814K - Septembre 2025

Réglages du moteur :

Rotation continue

Vitesse pour Remover : 400-800 rpm

Max Torque Remover : 2,5 N.Cm

Vitesse pour SC1, SC2, SU : 250-400 rpm

Torque SC1, SC2-SU : 1,8-2,5 N.Cm

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : 01 49 76 70 02 / Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.septodont.fr

Veuillez consulter les indications et la notice d'utilisation de BioRoot™ Flow et de la gamme GenEndo sur notre site internet www.septodont.fr. • BioRoot™ Flow : Ciment de scellement canalaire définitif réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPP. Dispositif médical implantable de classe III, organisme notifié : BSI. Marqué CE2797. Fabricant : Septodont - France. • GenENDO Limes K/GenENDO Remover/GenENDO Glider/GenENDO Revo-S+ sont des dispositifs médicaux réservés à l'usage professionnel dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPP. Uniquement, dans les traitements endodontiques non chirurgicaux. Fabriqués par Micro-Mega SA - FRANCE. Classe I marquage CE et Classe IIa marquage CE0459 Gmed. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice et l'étiquetage avant toute utilisation.

