


Moteur GenENDO

Guide d'utilisation




Aperçu du moteur

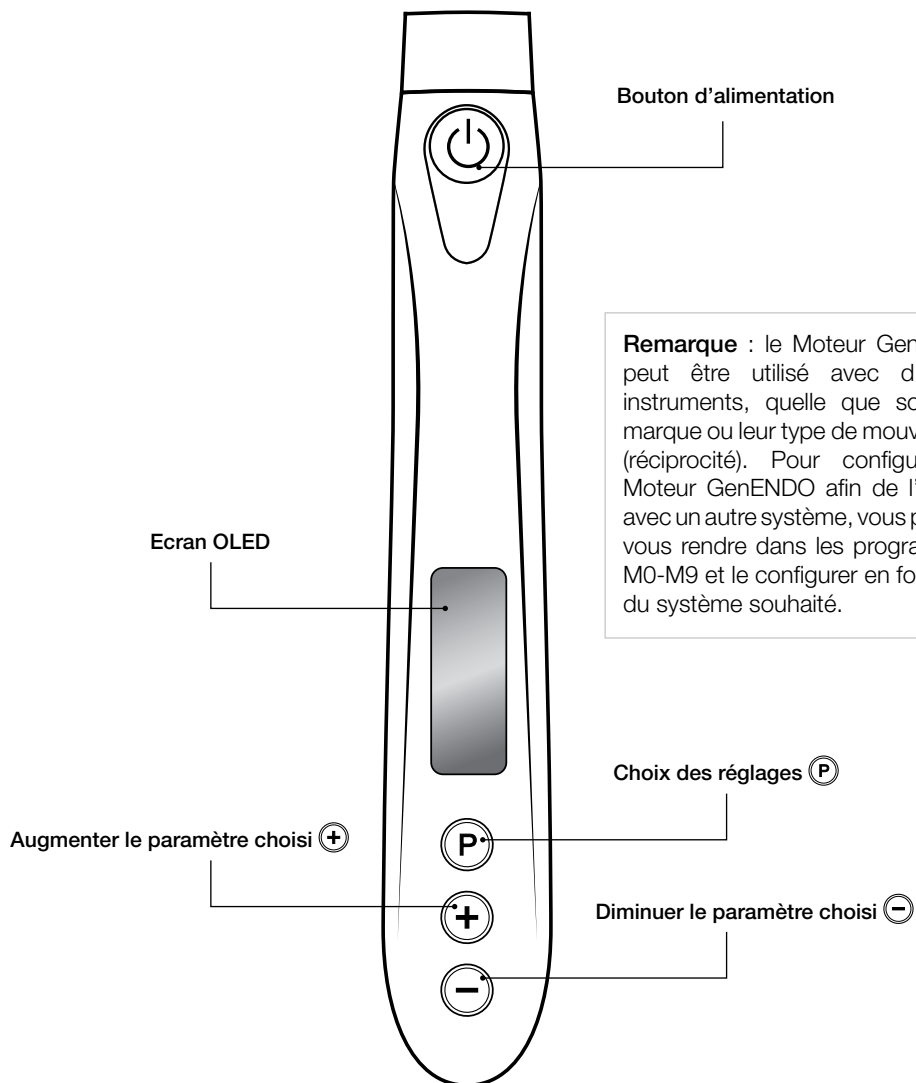

Allumez le moteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le Moteur GenENDO.

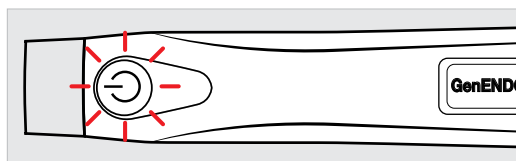

Préréglages du moteur

Le Moteur GenENDO est fourni avec des préréglages pour les instruments en rotation continue GenENDO

Paramètres du GenENDO Revo-S+ (SC1, SC2, SU) Glider & Remove pour la rotation continue. Utilisez le bouton  pour passer d'un réglage d'instrument à un autre.


GenENDO Revo-S+ (SC1, SC2, SU) paramètres pour la rotation continue

- Vitesse : 400 rpm
- Couple : 2,5 N.cm

Avertissement


Le moteur comprend des préréglages pour la rotation continue (CR) et la rotation alternée (RR).

Assurez-vous de sélectionner le mode rotation continue Revo-S+CR pour un fonctionnement sûr et fiable.

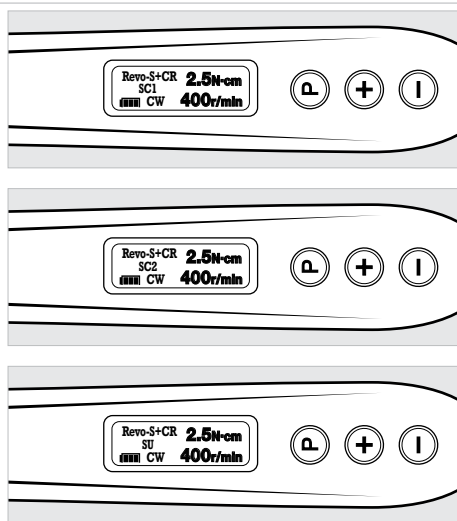


GenENDO Glider paramètres pour la rotation continue

- Vitesse : 350 rpm
- Couple : 1,2 N.cm

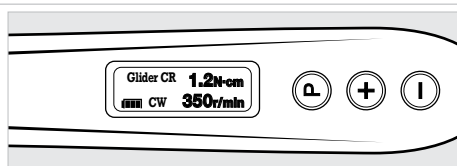

GenENDO Remove paramètres pour la rotation continue



- Vitesse : 800 rpm
- Couple : 2,5 N.cm

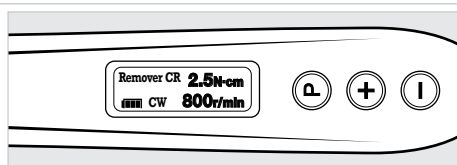

Eteindre le moteur

Pour éteindre :

Maintenez le bouton  , puis appuyez sur le bouton d'alimentation.

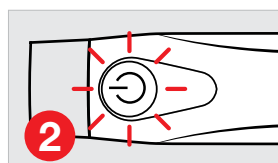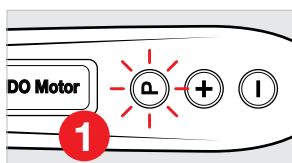


Recommandations de maintenance et de nettoyage

Contre-angle

Il est recommandé de nettoyer et de désinfecter le contre-angle **avant la première utilisation et après chaque utilisation.**

Instructions de nettoyage et de désinfection :


- À l'aide du connecteur, nettoyez et désinfectez le contre-angle avec un désinfectant au pH neutre.
- Après la désinfection, lubrifiez-le avec une huile de nettoyage spécifique.
- Enfin, stérilisez-le à haute température et haute pression : 134 °C, 2,0 - 2,3 bars (0,20 MPa - 0,23 MPa).

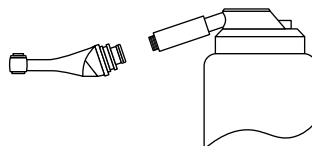

Le contre-angle doit être lubrifié après le nettoyage et la désinfection, et avant la stérilisation.

Chargement de la batterie

- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de batterie à l'écran cesse de clignoter.
- Après le chargement, débranchez l'adaptateur secteur.
- Le moteur GenENDO doit être utilisé avec l'adaptateur secteur d'origine (5V 1A).

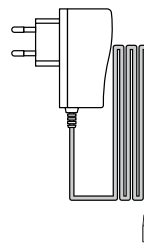

Paramètres du moteur GenENDO

Instrument	Mouvement	Couple (Ncm)	Vitesse (rpm)
GenENDO Revo-S+ CR (SC1 SC2 SU)	Rotation continue	2.5	400
GenENDO Glider	Rotation continue	1.2	350
GenENDO Remover	Rotation continue	2.5	800

Veuillez consulter l'indication et la notice d'utilisation du Moteur GenEndo sur notre site internet www.septodont.fr. GenENDO Moteur est un dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPP. Organisme certificateur CE0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Fabriqué par Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice et l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont

58 rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : 01 49 76 70 02 / Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.septodont.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux **Septodont France**

